



Was ist ein ZAHNIMPLANTAT?

Ein Zahnimplantat ist eine **künstliche Wurzel**, die im Kieferknochen verankert wird. Sie hat die Form einer Schraube und den Zweck, einen festsitzenden oder herausnehmbaren Zahnersatz aufzunehmen. Das Zahnimplantat ersetzt somit eine Zahnwurzel, die aus dem Kiefer entfernt werden musste. Der Implantatkörper ist meist aus Titan, einem sehr gut verträglichen Material.

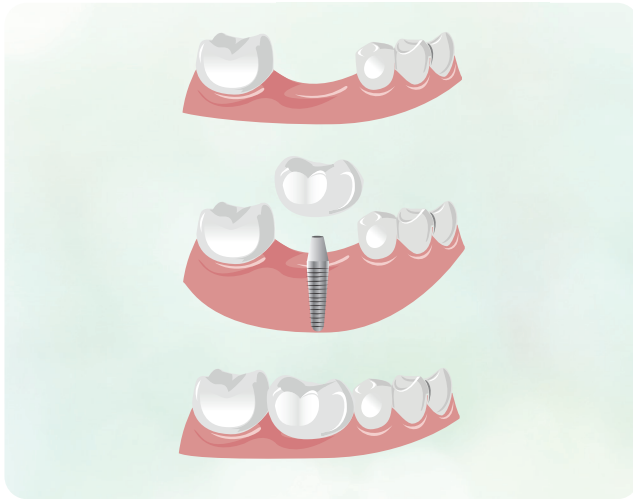


Zahnimplantate bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, vom Ersatz eines verlorenen Zahnes bis hin zum Ersatz sämtlicher Zähne eines Kiefers ...

Ein Zahn fehlt

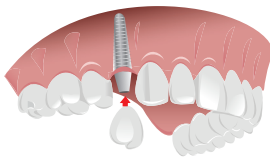

Eine Reihe benachbarter Zähne oder alle Zähne fehlen.

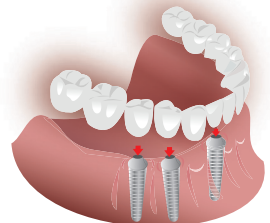

DIE VORTEILE DES ZAHNIMPLANTATES

Die Erhaltung der Knochensubstanz

Schon durch das Fehlen eines Zahnes verliert der Kieferknochen zunehmend an Volumen. Das Einsetzen eines Zahnimplantates ermöglicht, das Knochenvolumen zu erhalten und Knochenabbau zu vermeiden.

Die Ästhetik

Das Zahnimplantat und seine Krone ähneln einem echten Zahn und passen sich perfekt dem Mund an. Sie werden das Gefühl haben, dass es sich um natürliche Zähne handelt. Dies gibt Ihnen Selbstvertrauen im täglichen Leben.

Die Sicherheit

Implantat-Technologie und -Technik sind erprobt und sicher. Implantate werden bereits seit über 40 Jahren erfolgreich eingesetzt. Sie sind widerstandsfähig und sehr gut verträglich.

Die weltweite Erfolgsquote der Implantate liegt bei über 95%. Voraussetzung dafür ist eine gründliche Reinigung und Pflege des Implantates und der regelmäßige Kontrollbesuch in Ihrer Zahnarztpraxis.

Rauchen ist einer der größten Risikofaktoren für Implantatverlust.

WUSTEN SIE ...

???

... dass man im ersten Jahr nach Verlust eines oder mehrerer Zähne zwischen 20 und 30% der Knochensubstanz verlieren kann? Die natürlichen Zahnwurzeln stimulieren das Knochenwachstum. Wird ein Zahn entfernt, produziert der Knochen in diesem Bereich keine Zellen mehr, was einen Verlust der Knochenmasse zur Folge hat. Nach wenigen Jahren kann dieser Verlust bis zu 80% betragen. Daher ist es wichtig, verlorene Zähne schnell zu ersetzen.

???

... dass ein einziger fehlender Zahn den ganzen Mund destabilisieren kann? Wenn er nicht ersetzt wird, ist dies der erste Schritt zu einem Lockerungsprozess oder mehrfachem Zahnverlust.



MUND- und ZAHNPFLEGE*

Implantate benötigen eine besondere Pflege und damit auch besondere Produkte und Hilfsmittel. Lassen Sie sich hier von Ihrer Zahnarztpraxis beraten. Diese geben Ihnen gerne Tipps und weisen Sie in Techniken zur optimalen Pflege ein, damit Ihr Implantat ein Leben lang erhalten bleibt.

Die optimale Mund- und Zahnpflege während des Behandlungsverlaufes:

Während der Einheilungsphase ist eine schonende, aber gründliche Mund- und Zahnpflege wichtig. In den ersten Tagen nach der Implantation ist es empfehlenswert, sogenannte postoperative oder chirurgische Zahnbürsten mit extra weichen Borsten zu verwenden. Mit diesen kann auch die Wunde sanft gereinigt werden. Für das restliche Gebiss kann die gewohnte Zahnbürste benutzt werden.



Zur Reduktion des Infektionsrisikos empfehlen Zahnärzte oft eine antibakterielle Mundspülung (z. B. mit Chlorhexidin). Unterstützen können Sie dies mit der Verwendung einer Zahnpasta mit antibakteriellen Inhaltsstoffen.



Tipps

Für die häusliche Implantat- und Zahnpflege

Ein Implantat sollte genau so gereinigt werden wie die restlichen Zähne – das bedeutet:

- Reinigung der Zahnzwischenräume und um die Implantate herum – mit Interdentalbürsten, Interdentalreinigern oder Spezial-Zahnseide.
- Zähneputzen mit einer manuellen oder einer elektrischen Zahnbürste morgens und abends ca. 3 Minuten lang.
- Verwendung von Zahnpasten und Mundspülungen mit antibakteriellen Inhaltsstoffen, um eine Entzündung des Zahnfleisches zu vermeiden. Zusätzlich, um Entzündungen am Implantat vorzubeugen, täglich probiotische Lutschtabletten.
- Je nach Implantat Monobüschelzahnbürsten zur täglichen Reinigung verwenden.

Ebenso wichtig ist die regelmäßige professionelle Zahn- und Implantatreinigung in der Zahnarztpraxis.

Die Kombination von häuslicher und professioneller Pflege sichert langfristig Ihre Mundgesundheit und damit ein langes Implantat-Leben.

SUNSTAR Deutschland GmbH

GUMSunstarDE

gumsunstarde

www.SunstarGUM.de



Art.-Nr. T4 02/2025

GUM® - Pflege, was du liebst Für eine optimale Implantatpflege




Wir empfehlen

- ✓ **GUM® PAROEX® 0,12% Zahngel** (PZN DE-0024012 / AT-3115732)
 - Enthält 0,12% CHX und 0,05% CPC
 - Vor und nach chirurgischen Eingriffen wie z.B. beim Setzen des Implantates
- ✓ **GUM® Post-Operation Zahnbürste** (PZN DE-0312254 / AT-3115637)
 - Nach chirurgischen Operationen für eine schonende Reinigung
 - Nur zum kurzzeitigen Gebrauch
- ✓ **GUM® PAROEX® 0,06% Zahnpasta** (PZN DE-0196285 / AT-3444045)
GUM® PAROEX® 0,06% Mundspülung (PZN DE-0195883 / AT-3190202)
 - Enthalten 0,06% CHX und 0,05% CPC
 - Zur täglichen Pflege und Schutz vor Zahnfleischentzündungen
- ✓ **GUM® Büschelbürste** (PZN DE-4549970 / AT-3115643)
 - Speziell entwickelt für eine optimale Reinigung der Implantatbereiche
 - Kleiner runder Büstenkopf
- ✓ **GUM® PRO Zahnbürste** (PZN DE-17935930 / AT-4394160 weich)
 - Einzigartige Borstenstruktur für eine gründliche und schonende Reinigung
- ✓ **GUM® Zungenreiniger** (PZN DE-18835001 / AT-3115790)
 - Entfernt bakterielle Zungenbeläge und reinigt die Zunge effektiv
- ✓ **GUM® PerioBalance®** (PZN DE-10032691 / AT-4359264)
 - Zur Prophylaxe von Entzündungen um das Implantat
- ✓ **GUM® TRAV-LER® Interdentalbürsten**
 - CHX beschichtet – hält die Bürste hygienisch
 - Flexibler ergonomischer Griff
- ✓ **GUM® SOFT-PICKS®**
 - Optimal für unterwegs und zwischendurch
 - Weiche metal-, latex- und silikonfreie Filamente
- ✓ **GUM® ACCESS FLOSS** (PZN DE-4364319 / AT-4123975)
 - Ideal zur Reinigung bei Implantaten
 - Einfädelhilfe auf beiden Seiten + Flauschfaden

Erhältlich in Zahnarztpraxen, Apotheken
und in ausgewählten Drogerien

Im Blickpunkt ...

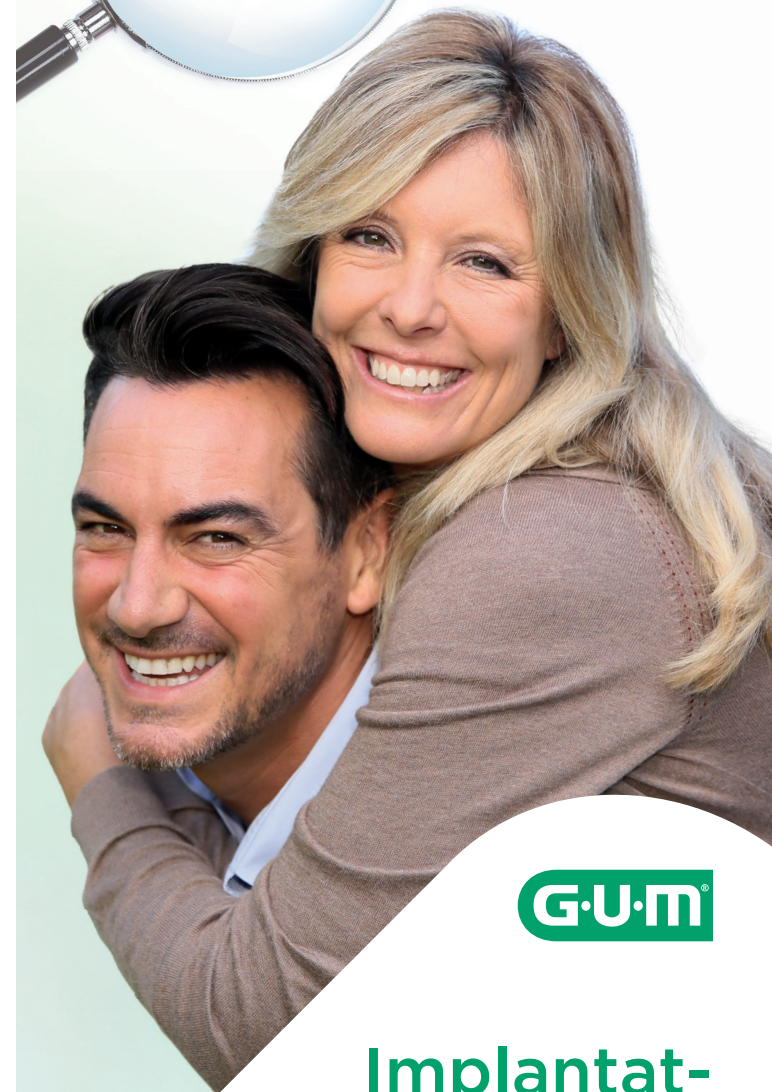

G·U·M®

**Implantat-
pflege**