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


Prescription destinée à
M. _____




TRAV-LER® ● Protection anti-bactérienne des brins - Blister de 4



- 1312** 520 341 7 0,6 mm ISO 0
- 1314** 478 864 0 0,8 mm ISO 1
- 1412** 767 750 4 0,9 mm ISO 2
- 1414** 767 751 0 1,1 mm ISO 3
- 1512** 767 752 7 1,2 mm ISO 3
- 1514** 767 753 3 1,3 mm ISO 4
- 1612** 767 755 6 1,4 mm ISO 4
- 1614** 767 756 2 1,6 mm ISO 5
- 1618** 478 865 7 2,0 mm ISO 6
- 1619** 624 371 0 2,6 mm ISO 7

- 1699** 627 429 6 *Multipack*
(10 brosselettes)

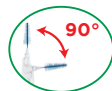

BI-DIRECTION ● Orientable en 2 positions - Blister de 6
Simple d'utilisation

- 2014** 628 083 5 0,6 mm ISO 0
- 2114** 450 734 5 0,7 mm ISO 1
- 2314** 435 688 6 0,9 mm ISO 2
- 2614** 435 689 2 1,2 mm ISO 3
- 2714** 628 083 4 1,4 mm ISO 4

SOFT-PICKS® ● Bâtonnet caoutchouc



- 689** 634 570 9 **PRO Small** NOUVEAU
- 690** 634 571 5 **PRO Medium**
- 691** 634 571 2 **PRO Large**
- 669** 632 672 1 **MINTY Small**
- 670** 621 489 3 **MINTY Medium**
- 671** 632 672 0 **MINTY Large**

- 7010** 462 624 5 *Probiotiques*
à base de *Limosilactobacillus reuteri* Prodentis® *30 comprimés*



- 1770** 720 843 6 *Gel dentifrice*
75 ml






BROSSETTES INTERDENTAIRES

MODE D'UTILISATION

- 1 Utiliser une brosse à dents interdentaire avant le brossage des dents.
- 2 Glisser délicatement la brosse à dents interdentaire dans l'espace interdentaire et effectuer au moins 6 mouvements de va-et-vient. Ne pas «forcer» l'insertion d'une brosse à dents interdentaire si l'espace est trop étroit.
- 3 Rincer la brosse à dents interdentaire sous l'eau après utilisation. Jeter la brosse à dents interdentaire dès usure (entre 7 et 10 jours après la première utilisation).


TRAV-LER

Plier la brosse à dents interdentaire au niveau du manche pour un meilleur accès au secteur postérieur.
Ne pas plier la tige métallique au risque de la casser.

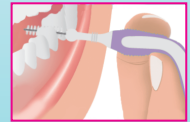

BI-DIRECTION


Faire glisser le poussoir vers l'avant ou l'arrière pour orienter la tête de la brosse à dents interdentaire.
(180° : secteur antérieur - 90° : secteur postérieur)

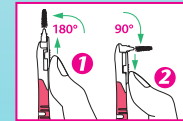

NOTE / PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

La marque GUM est disponible **exclusivement en pharmacies et parapharmacies**.
Liste de points de vente et informations complémentaires sur SunstarGUM.fr

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

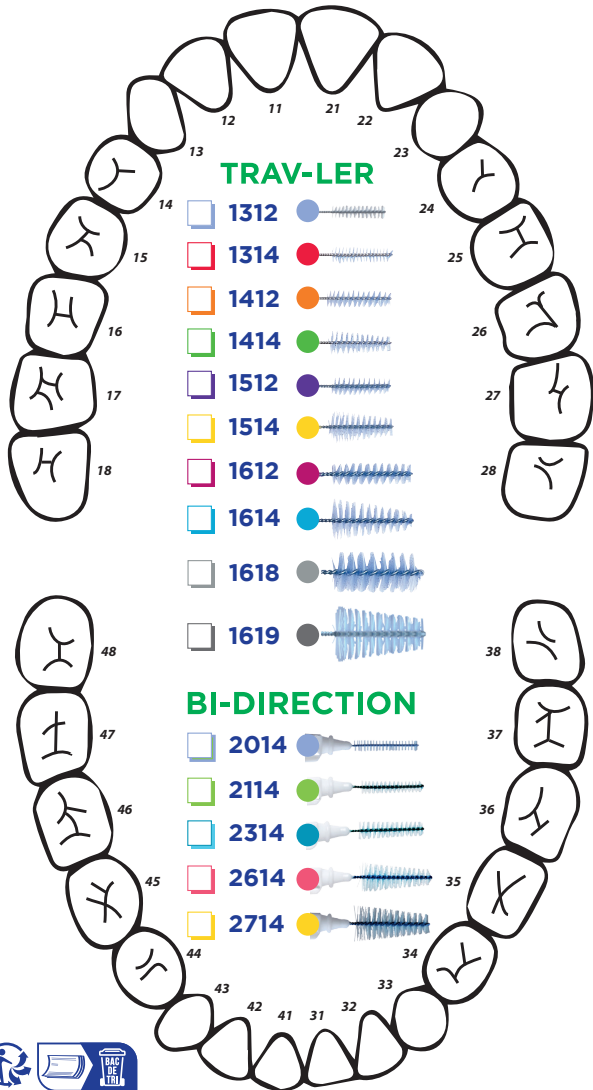

Brossettes à taille réelle

